



# Simulateur pour injection Vaccination IM (Pack de 10)

Référence **SPEC162**

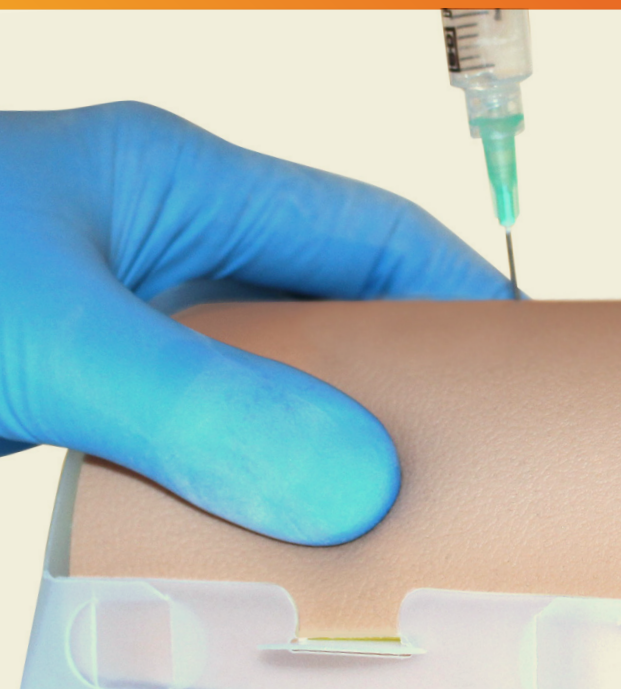


## Contenu du Pack


Coussinet cutané (x10)

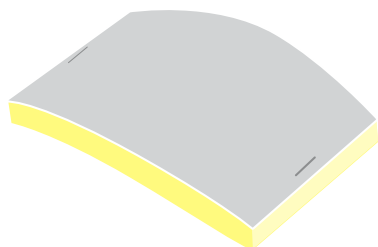


Bloc musculaire (x10)

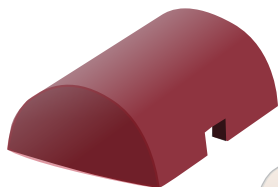


Bloc de mousse  
absorbante (x10)

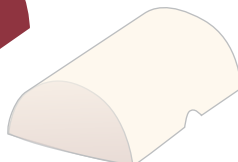

Plateforme de support (x10)

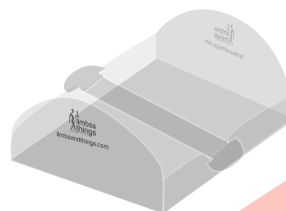

Tampon  
d'absorption (x10)

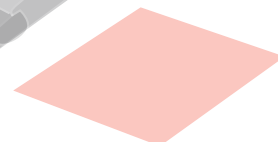

Pour découvrir plus de simulateurs procéduraux, visitez  
**laerdal.com**



Pour les injections, nous recommandons un mélange d'eau et d'agent antifongique (par exemple Milton) pour stériliser l'eau et réduire la formation de moisissure.




Assurez-vous que le produit est séché après utilisation et avant stockage

## UTILISATION ET STOCKAGE


1

Déclipsez une extrémité de la bande de maintien

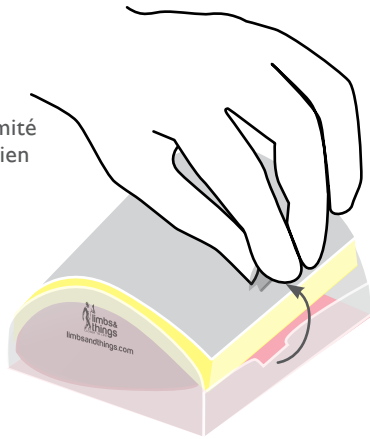


2

Puis déclipsez l'autre extrémité et soulevez le coussinet cutané et le bloc musculaire de la plateforme

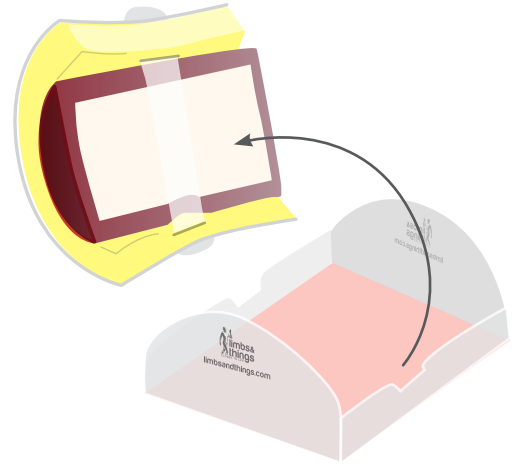


3

Retirez délicatement de la fente du coussinet cutané une extrémité de la bande de maintien

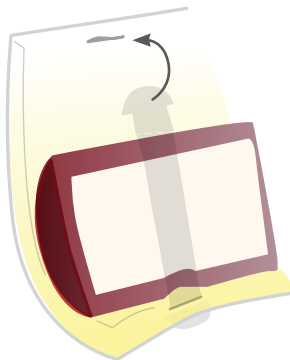


4

Retirez le coussinet cutané et la bande de maintien sur le côté

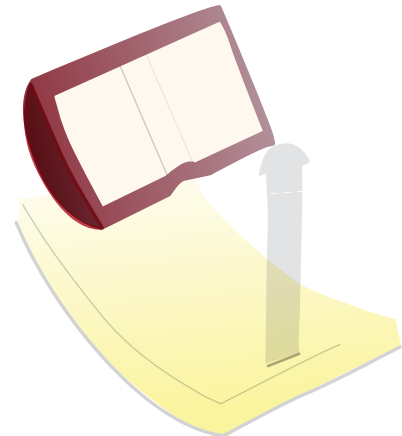

5

Retirez l'éponge de l'intérieur du bloc musculaire

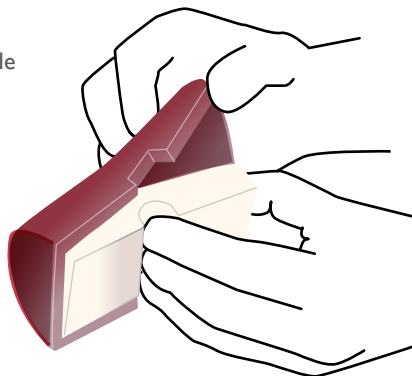

6

Pressez l'éponge pour éliminer le liquide et laissez-la sécher naturellement

